

Пам'ятка лікарю, фармацевту. СаноСкін Мелладерм ПЛЮС Тюлле.

Описання перев'язочного продукту.

СаноСкін Мелладерм ПЛЮС Тюлле є компресом на основі бавовняної-полістиролової сітки, на яку нанесено Malladerm PLUS медову мазь. Компартаменти сітки є достатньо великими для безперешкодного абсорбування ранового ексудату вторинним абсорбуючим компресом. Malladerm PLUS-Tulle складається з: Меду, PEG 4000, Пропілен глікоколь і Гліцерол.

Тюлле (сітка) є каркасом, матрицею для нанесеного на нього Мелладерм Плюс Гелю. Завдяки осмотичній активності медового гелю забезпечується вологий клімат на поверхні рани, що разом із протизапальною дією зменшує запалення, набряк, біль, очищає рану і цим сприяє швидкому її загоюванню.

СаноСкін Мелладерм Плюс є первинним перев'язочним продуктом, його потрібно покритий вторинним перев'язочним матеріалом (Стеллаліне, Стеропад).

Показання:

Хронічні рани: пролежні, трофічні виразки (Фото 1, Фото 3), онкологічні рани, діабетична стопа (Фото 2), пролежні.

Гострі рани: хірургічні після оперативні рани, травматичні рани (скальповані, різані), опікові рани.

Шкірні інфекції: Стрептодермія, Піодермія, Герпес.

Протипоказання:

- Неможна використовувати продукт з пошкодженою упаковкою.
- На сьогодні не виявлено жодних протипоказань щодо застосування Мелладерм ПЛЮС Тюлле.
- Підвищена чутливість до СаноСкін Мелладерм ПЛЮС Тюлле або до інгредієнтів, які входять до даного продукту.

Застереження при застосуванні:

Бактеріальна колонізація не є протипоказанням щодо застосування гелю. При появі ознак інфікування рани комбінуйте пов'язку з антисептиком Раностоп і проконсультуйтеся з лікарем для призначення лікування антибіотиками. В процесі лікування розміри рани можуть збільшитись завдяки аутолітично-дебридуєчій (розчинення мертвих тканин) дії продукту.

Спосіб використання:

- Рану промити під душем, фізіологічним розчином або при допомозі SanoSkin Cleanser.
- Просушіть шкіру навколо рани.
- Зніміть захисну плівку сітки стерильними рукавицями або стерильним пінцетом і накладіть сітку Мелладерм Тюлле на поверхню рани.

- Ніколи не накладайте 2-х і більше шарів медової сітки, щоб не закрити відкриті проміжки в сітці. Це перешкодить видаленню ексудату з рани і може спричинити розвиток мацерації здорової шкіри навколо рани.
- При потребі СаноСкін Мелладерм Плюс Тюлле можна обрізати до потрібних розмірів за допомогою стерильних ножиць.
- При потребі додайте Мелладерм Плюс мазь на поверхню медової сітки.
- Покрийте Мелладерм ПЛЮС Тюлле вторинним перев'язочним матеріалом (Стеллаліне, Стеропад) і зафіксуйте бинтом чи пластиром.
- Міняйте пов'язку приблизно кожних 2 дні (залежно від фази заживання рани).

Умови зберігання: При температурі 0 - (+)25 градусів.


Фото 1



Фото 2



Фото 3

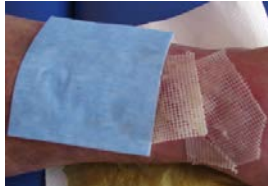

Виробник: Sano Med Manufacturing B.V, Голандія.

Офіційний представник в Україні: Бельгійський Медичний Центр.

Свідоцтво про державну реєстрацію №10349/2011 від 08 липня 2011р №417.