

## ПАМ'ЯТКА ЛІКАРЮ, ФАРМАЦЕВТУ. СаноСкін Мелладерм ПЛЮС

### Описання перев'язочного продукту.

Мелладерм Плюс є гелем, що складається з: меду, гліцерину, пропілен гліколю, PEG 4000. При контакті продукту з раною відбувається звільнення рідкої фракції гелю. Завдяки його осмотичній активності забезпечується вологий клімат на поверхні рани, що разом із протизапальною дією меду зменшує запалення, набряк, біль, очищає рану і цим сприяє швидкому її загоюванню Melladerm Plus розроблений спеціально для пацієнтів, що мають некротичні рани (з відмерлими тканинами). (Фото 1, Фото 2).

Гель містить 45% меду. Більша його концентрація викликає біль. Це спеціально відібраний мед з високогірного квіткового регіону, що має природньо високий вміст окисленої глюкози і фенолу. Під час виготовлення гелю, мед не нагрівають і не опромінюють, тому що це спричинює знищення лікувальних властивостей меду.

Гель, в основі якого є мед, має гарну антибактеріальну властивість і нейтралізує запах з рани. Мазь Melladerm® Plus контролює бактеріальний баланс і підтримує вологе середовище в рані. Завдяки кислотній рН завдяки Melladerm® Plus потрапляє більше кисню до клітин і руйнівна металопротеїназа (ММР) перестає діяти.

СаноСкін Мелладерм Плюс є первинним перев'язочним продуктом, його потрібно покритий вторинним перев'язочним матеріалом (Стеллаліне, Стеропад).

### Показання:

Хронічні рани: пролежні, трофічні виразки (Фото 3), онкологічні рани, діабетична стопа (Фото 5), пролежні (Фото 4, Фото 8).

Гострі рани: хірургічні після оперативні рани, травматичні рани (скальповані, різані), опікові рани (Фото 7).

Шкірні інфекції: Стрептодермія, Піодермія, Герпес.

### Протипоказання:

- Не можна використовувати тюбик, який був пошкоджений.
- На сьогодні не виявлено жодних протипоказань щодо застосування SanoSkin Melladerm PLUS.
- Підвищена чутливість до СаноСкін Мелладерм Плюс або до інгредієнтів, які входять в даний продукт.

### Спосіб використання:


1. Обережно відкрийте тюбик, зважаючи на стерильність.
2. Видавть потрібну кількість гелю безпосередньо в рану або на стерильний шпатель.
3. Рівномірно нанесіть гель на поверхню рани стерильним шпателем.
4. Кількість мазі Melladerm®Plus повинно бути достань в рані, щоб досягти потрібного ефекту. Гель є легкорозчинним продуктом, що дозволяє безперешкодному видаленню з рани при промиванні.
5. Покрийте гель стерильним не абсорбуючим компресом (Фото 6): Стеллаліне, Стеропад.
6. Поміняйте пов'язку після того, як гель повністю розчиниться в рані - через 24-48 годин, залежно від кількості ексудату, що продукує рана.
7. Для кращого втримування гелю в рані комбінуйте його з Мелладерм Тюлле (медова сітка) Фото 2Б або СаноСкін Нет.
8. При інфіковано-некротичних ранах комбінуйте його з Раностопом Фото 3Б (Полівідон йод).

### Застереження при застосуванні:

- ❖ При кожній перев'язці інспектуйте рану, після її промивання.
- ❖ Бактеріальна колонізація не є протипоказанням до застосування гелю.
- ❖ Розміри рани можуть збільшитись (Фото 8) завдяки аутолітично-дебридуючій (розчинення мертвих тканин) дії гелю. І це є позитивним результатом.
- ❖ Термін зберігання продукту вказано на упаковці.

Умови зберігання: При температурі 0 - (+) 25 градусів.

Φοτο 1:

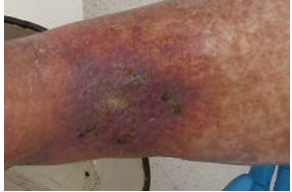

Φοτο 2:



Φοτο 2β



Φοτο 3:



Φοτο 3β



Φοτο 4:



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8 (23\03)



(02\04. 3 перев'язки)



*Виробник: Sano Med Manufacturing B.V, Голандія.  
Офіційний представник в Україні: Бельгійський Медичний Центр.  
Свідоцтво про державну реєстрацію №10349/2011 від 08 липня 2011р  
№417.*